

耳かけ型 RT リサウンド・ワン マリー™ リサウンド・ワン™ 取扱説明書

<p>製造販売元 GNヒアリングジャパン株式会社</p> <p>一般のお客様電話番号 ☎ 0120-921-102</p> <p>販売店様専用電話番号 ☎ 0120-921-310</p> <p>FAX番号 ☎ 0120-937-134</p> <p>受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 （土日祝日、年末年始は休み）</p> <p>〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3MM/パークビル8F</p>	<p>ReSound GN</p> <p>401305015B_JP_RT_O2_2007A</p>
---	---

はじめに

この度はリサウンド補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では当補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。この取扱説明書では、各器種を以下のように呼びます。

この取扱説明書での呼び方	リサウンド・ワン 9	リサウンド・ワン 7	リサウンド・ワン 5	リサウンド・ワン 4
61タイプ	RT961-DRW	RT761-DRW	RT561-DRW	RT461-DRW
62タイプ	RT962-DRW	RT762-DRW	RT562-DRW	RT462-DRW

安全上のご注意（必ずお守りください）

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

■ **表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。**

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

■ **お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。**

禁止	この表示は、してはけない「禁止」の内容です。
-----------	------------------------

【禁忌・禁止】

- 次の場合、補聴器を使用しないでください。
 - 耳を治療中の場合
 - 耳の中に痛みがある場合
 - 先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合
 - 過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合
 - 過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合
 - 急性または慢性的めまいがある場合
 - 耳あか、または異物の集積が明らかな場合
- 次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。
 - 耳漏が生じたとき
 - 耳の治療が必要になったとき
 - 耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき

目次


はじめに

安全上のご注意

- 製品概要
 - 各部の名称と役割
 - 付属品一覧
- 基本的な使い方
 - 電源の入れ方／切り方
 - 電池寿命お知らせ機能
 - 音量調節
 - プログラム変更
 - 電話での使用
 - スマートフォンアプリとの使用
 - スムーズホンの使用
 - ワイヤレスアクセサリー
 - テレコイル
 - リサウンドアシスト遠隔サポート
- 使用上の注意
- 電池使用上の注意
- 故障かな?と思ったら
- 性能表
- 音響諸特性
- アフターサービス

1 製品概要

1-1. 各部の名称と役割

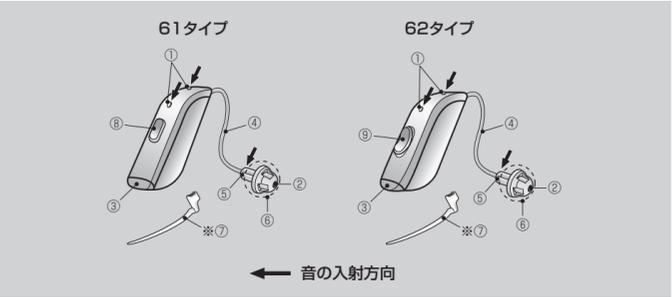

- 音の入口**
音を集めるためのマイク
- 音の出口**
本体内部で増幅された音声を外耳道に導く
- 電池ケース**
電池を収納する
- レシーバチューブ**
増幅した音声をワイヤーを通して耳に送り届ける
- レシーバ/※マイク**
音を出力する部分／※リサウンド・ワン マリーのみ
- 耳せん**
- スポーツロック**
耳せんと補聴器が正しく耳に装着されるように固定
※ レシーバの種類によって形状が異なり、付かない場合もある
- プログラム選択ボタン**
プログラムの切り替え、ワイヤレス通信の開始に使用
- マルチファンクションボタン**
プログラムの切り替え、音量調節、ワイヤレス通信の開始に使用

1-2. 付属品一覧（携帯用ケースを除く）

※ □にチェックマークをして、ご使用前にご確認ください。
※ 両耳で購入された場合、「マークのついたものは2個(本)付属します。」

① 電池（1個）*	② 耳せん（1個）*	③ レシーバチューブ（1本）*
<input type="checkbox"/> 61タイプ PR41/312	<input type="checkbox"/> ※ご注文時に選択したものが付属します。	<input type="checkbox"/> ※ご注文時に選択したものが付属します。
<input type="checkbox"/> 62タイプ PR48/13	<input type="checkbox"/> ※レシーバの形状に合わせた種類が付属します。	<input type="checkbox"/> ※レシーバの種類によって形状が異なり、付かない場合もあります。
④ 耳あかガード（1ケース）*	⑤ スポーツロック（1本）*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 耳あか掃除ブラシ（1本）	⑦ 乾燥ケース（1個）	⑧ クリーニングクロス（1枚）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ 左右識別チップ（左右各1本）		
<input type="checkbox"/>		
○ オプション（別売）		
⑩ イヤモールド	⑪ マグネット（スムーズホン用）	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2 基本的な使い方

2-1. 電源の入れ方／切り方

電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケースを完全に閉じると電源が入り、開けると電源が切れます。



■ **スマートスタート機能**
補聴器を耳に装着する際に不快なハウリング（ピーピー音）を防ぐ為の機能です。この機能をオンにすると、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音（ポーン、ポーン、ポーン…）が鳴ります。

2-2. 電池寿命お知らせ機能


電池残量が少なくなると、電子音（ポポポポーン）が15分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、新しい電池と交換してください。予備の電池を常に携帯することをおすすめします。

■ **ワイヤレスアクセサリー（オプション）使用時**
ワイヤレスアクセサリー使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリーが使えなくなります。新しい電池に交換すると、ワイヤレスアクセサリーは再び使用できます。

電池残量	お知らせ音	補聴器	シンプルリモコン、リモコンユナイトII	TVユナイトII、携帯ユナイトII、マルチマイク、マイクロマイク、スマートフォンなど
(多)	—	○	○	○
(少)		○	○	×
(極少)		×	×	×

2-3. 音量調節

■ **音量調節**
本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。

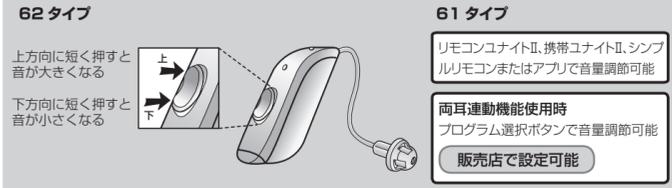

※ マルチファンクションボタンを押すと「ピッピッ」というお知らせ音が鳴ります。上限あるいは下限に達すると「ポー」という音に変わります。
※ 電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。
※ 初期設定を変更した場合の詳細は、お買い求めの販売店にご相談ください。

両耳運動機能使用時	販売店で設定可能 オン/オフ
片耳の補聴器の音量を変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更します。	

2-4. プログラム変更

お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。また、ワイヤレスプログラムも最大で3つ設定することができます。下記の操作をするたびに通常プログラム、またはワイヤレスプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。

タイプ名	プログラムの切り替え方法	ワイヤレスプログラムの切り替え方法
61タイプ	プログラム選択ボタンを押す	プログラム選択ボタンを1秒間長押しする
62タイプ	マルチファンクションボタンの上を3秒間長押しする	マルチファンクションボタンの下を3秒間長押しする
プログラム	お知らせ音	内容・使用環境
プログラム1	ポーン	
プログラム2	ポーン、ポーン	
プログラム3	ポーン、ポーン、ポーン	
プログラム4	ポーン、ポーン、ポーン、ポーン	

電源投入時の設定	両耳運動機能使用時 販売店で設定可能 オン/オフ
●「プログラム1」	片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。

■ フライトモード（ワイヤレス機能のオフ設定）

搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。（初期設定：オフ）

フライトモードの設定方法	販売店で設定可能 オン/オフ
--------------	-----------------------


- 電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。
- もう一度電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。
- もう一度電池ケースを閉じてください。「ポポーン、ポポーン、ポポーン…」というお知らせ音が鳴ると設定完了です。

■ フライトモードの解除方法	② 電池ケースを一度開け、閉めてください。	③ 「ポーン」というお知らせ音が鳴り終わってから、電池ケースを閉めた状態で30秒待つと解除されます。
① ポポーンというお知らせ音が鳴り終わってから、10秒以上待ってください。		

※ 「ポポーン」というお知らせ音が鳴る場合は、①からもう一度行ってください。

2-5. 電話での使用

本補聴器は、装着したままでも電話を使用することができます。

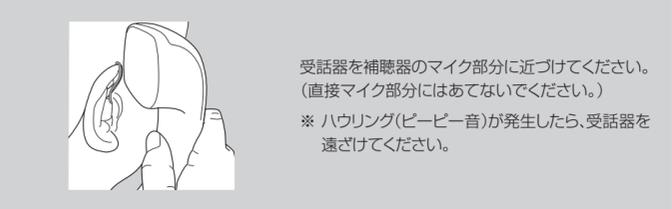

※ 本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

2-6. スマートフォンアプリとの使用

リサウンドのスマートフォンアプリとリサウンドのワイヤレス補聴器はスマートフォン経由で信号を送受信します。リサウンドのスマートフォンアプリは、リサウンドの補聴器と使用するように設計されています。


- 通知をオフにしないでください。
 - アプリが正しく作動するように、アップデートを行ってください。
- リサウンド以外の補聴器に接続してもその動作を保証するものではありません。
※ Bluetooth対応のスマートフォンをお持ちの場合は、携帯ユナイトIIを使用して通話することができます。

2-7. スムーズホンの使用（オプション）

スムーズホン用のマグネットを取り付けた受話器を耳にあてると、お知らせ音が鳴り、自動的に補聴器が電話モードになります。受話器を耳から離すと、自動的に元のプログラムに戻ります。必要に応じて、受話器の最適な位置をお探しください。

両耳運動機能使用時	販売店で設定必要 専用プログラム
受話器を当てていない耳の音量が下がります。	

■ マグネットの取り付け方

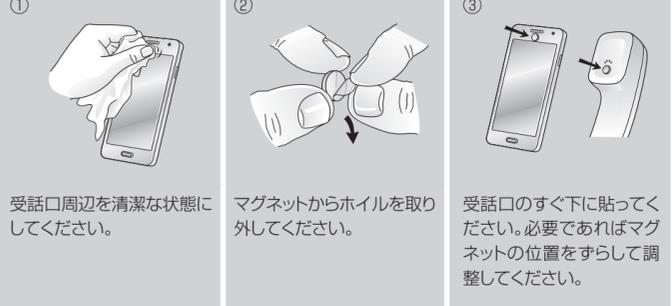

- ▲ **警告**
- スムーズホン用のマグネットは医療機器や電子装置に影響を与える可能性があります。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。
 - スムーズホンプログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にない可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。
 - 必ずリサウンドのスムーズホン用のマグネットをご使用ください。

2-8. ワイヤレスアクセサリー

リサウンドのワイヤレスアクセサリーは、高音質の音声で補聴器へのダイレクト送信が可能です。下記のワイヤレスアクセサリーがあります。
TVユナイトII：テレビやその他のオーディオ機器からの音声を、あなたに合った音量で補聴器にダイレクト送信します。
シンプルリモコン：補聴器の音量調整や消音、プログラム変更などができます。
リモコンユナイトII：補聴器の音量調整や消音、プログラム変更などができ、すべての設定を一目で見ることができます。

