

耳かけ型 RT リサウンド・ワン マリー™ リサウンド・ワン™ 取扱説明書

製造販売元
GNヒアリングジャパン株式会社
一般のお客様電話番号 ☎️ **0120-921-102**
販売店様専用電話番号 ☎️ 0120-921-310
FAX番号 ☎️ **0120-937-134**
受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
(土日祝日、年末年始は休み)
〒220-0012 神奈川県横浜市区みなとみらい3-6-3MMパークビル8F
401305015C JP RT 02 2007A **ReSound GN**

はじめに

この度はリサウンド補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では当補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。この取扱説明書では、各器種を以下のように呼びます。

リサウンド・ワン 9	リサウンド・ワン 7	リサウンド・ワン 5	リサウンド・ワン 4
RT961-DRWC	RT761-DRWC	RT561-DRWC	RT461-DRWC

安全上のご注意（必ずお守りください）

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすと、使用者が損害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。

禁止	この表示は、してはけない「禁止」の内容です。
-----------	------------------------

【禁忌・禁止】
1. 次の場合、補聴器を使用しないでください。

- 耳を治療中の場合
- 耳の中に痛みがある場合
- 先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合
- 過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合
- 過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合
- 急性または慢性的めまいがある場合
- 耳あか、または異物の集積が明らかな場合

2. 次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。

- 耳漏が生じたとき
- 耳の治療が必要になったとき
- 耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき


目次

はじめに
安全上のご注意

- 製品概要
 - 各部の名称と役割
 - 付属品一覧
- 基本的な使い方
 - 充電器の使用方式
 - 電源の入れ方／切り方
 - 電池寿命お知らせ機能
 - 音量調節
 - プログラム変更
 - 電話での使用
 - スマートフォンアプリとの使用
 - スムーズホンの使用
 - ワイヤレスアクセサリ
 - Q. リサウンドアシスト遠隔サポート
- 使用上の注意
- リチウムイオン電池の使用
- 故障かな?と思ったら
- 性能表
- 音響諸特性
- アフターサービス

1 製品概要

1-1. 各部の名称と役割

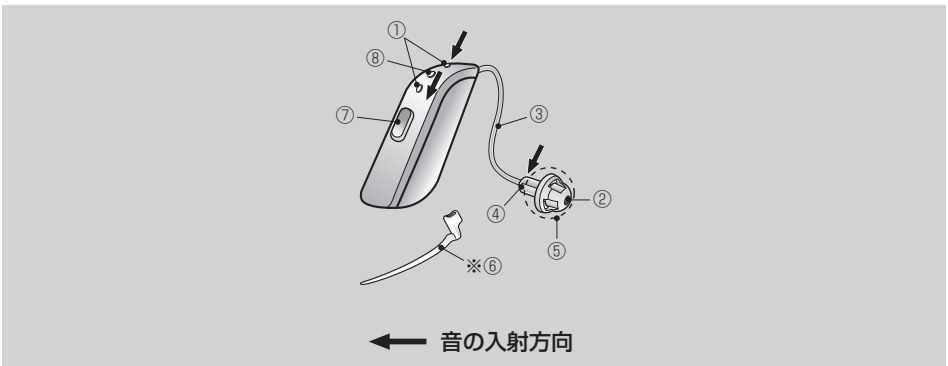

- 音の入口**
音を集めるためのマイク
- 音の出口**
本体内部で増幅された音声を外耳道に導く
- レシーバチューブ**
増幅した音声をワイヤーを通して耳に送り届ける
- レシーバ／※マイク**
音を出力する部分／※リサウンド・ワン マリーのみ
- 耳せん**
- スポーツロック**
耳せんと補聴器が正しく耳に装着されるように固定
※ レシーバの種類によって形状が異なり、付かない場合もある
- プログラム選択ボタン**
プログラムを切り替える(選択する)際に使用
- お知らせライト**
補聴器の動作状況を光でお知らせする

■ **充電器**：ご注文時に選択した充電器が付属します。

■ リサウンド・ワン充電器

- 補聴器ポケット
- レシーバポケット
- 補聴器電池残量お知らせライト
- 左マーク（青）
- 右マーク（赤）
- 充電器電池残量お知らせライト
- 充電用ケーブル
- 充電用ケーブル差込口

■ リサウンドワン簡易充電器

- 補聴器ポケット
- レシーバポケット
- 左マーク（青）
- 右マーク（赤）
- 充電用ケーブル
- 充電用ケーブル差込口

1-2. 付属品一覧（携帯用ケースを除く）

※ □にチェックマークをして、ご購入前にご確認ください。
※ 両耳で購入された場合、*マークのついたものは2個(本)付属します。

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ① 耳せん （1個）* | ② レシーバチューブ （1本）* | ③ 耳あかガード （1ケース）* |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ※ご注文時に選択したものが付属します。 | ※ご注文時に選択したものが付属します。 | ※レシーバの形状に合わせた種類が付属します。 |

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ④ スポーツロック （1本）* | ⑤ 耳あか掃除ブラシ （1本） |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ※レシーバの種類によって形状が異なり、付かない場合もあります。 |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ⑥ 乾燥ケース （1個） | ⑦ クリーニングクロス （1枚） | ⑧ 左右識別チップ （左右各1本） |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ※リサンド・ワン簡易充電器に付属。 | | |

○ オプション（別売）

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ⑨ イヤモールド | ⑩ マグネット（スムーズホン用） |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | |

2 基本的な使い方

2-1. 充電器の使用方式


使用前に、補聴器をフル充電することをお勧めします。

■ 補聴器の充電方式

① 充電用ケーブルを充電器の充電用ケーブル差込口に差し込み、反対側の先をコンセントに接続してください。

② 補聴器を補聴器ポケットに入れてください。右耳用の補聴器は赤い右マークのあるポケットに、左耳用の補聴器は青い左マークのあるポケットに入れてください。レシーバはレシーバポケットに入れてください。スポーツロックを着けている時は、補聴器を入れる時にご注意ください。

③ 充電中は補聴器のお知らせライトがゆっくりと点滅します。充電が完了するとお知らせライトは点滅から点灯へ変わります。補聴器を充電器から取り外すと消灯します。

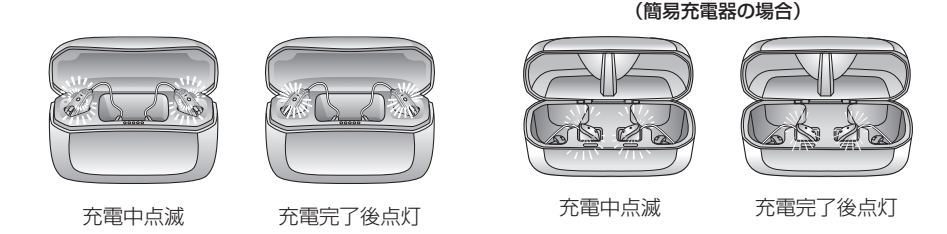

■ リサウンド・ワン充電器のお知らせライト

④ 充電器の補聴器電池残量お知らせライトは5つのLEDライトで補聴器の電池残量を表示します。補聴器をセットしたり外したりすると、10秒間点灯して電池残量を表示します。その後LEDライトは消えますが、充電は継続します。
⑤ 充電中、補聴器のお知らせライトは充電状況を表します。約3時間で充電は完了します。

補聴器電池残量お知らせライト	補聴器電池残量
●	0-20%
●●	20-40%
●●●	40-60%
●●●●	60-80%
●●●●●	80-100%

■ 充電器の充電方式

① 充電用ケーブルを充電器の充電用ケーブル差込口に差し込み、反対側の先をコンセントに接続してください。

② 充電器背面の3つの充電器電池残量お知らせライトは充電器の電池残量を表示します。1つのLEDライトが赤く点滅する時は充電器の充電中で電池残量が少ないことを表します。3つのLEDライトが緑で点灯している時はフル充電であることを表します。約3.5時間で充電は完了します。

③ 充電器がフル充電されると、6台の補聴器をフル充電することができます。（その間、充電器をケーブルにつなぎ充電する必要はありません）

充電器電池残量お知らせライト	充電器電池残量
●	赤色点滅 電池残量10%以下
●	10 - 33% 充電済み
●●	33 - 66% 充電済み
●●●	66 - 100% 充電済み

▲ **注意**

- 安全のため、必ずリサウンドの充電器、ACアダプター及び充電ケーブルをお使いください。他社製の物は正しく動作しない可能性があります。
- ※ 充電器を最初に充電する時には、充電器電池残量お知らせライトが充電完了と表示しても3時間以上充電してください。
- ※ 一晚コンセントに差したままでも安全です。充電器も補聴器も過充電されることはありません。

2-2. 電源の入れ方／切り方

充電器から取り出すと、自動的に電源が入ります。電源が入った状態で、プログラム選択ボタンを5秒間長押しすると電源が切れます。電源が切れた状態でプログラム選択ボタンを5秒間長押しすると電源が入ります。24時間以上、コンセントに接続していない充電器に補聴器を入れておくと、充電器から取り出しても自動的に電源が入りません。この場合はプログラム選択ボタンを5秒以上長押しして電源を入れてください。

■ **スマートスタート機能**

補聴器を耳に装着する際に不快なハウリング（ピーピー音）を防ぐ為の機能です。この機能をオンにする、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音（ポーン、ポーン、ポーン…）が鳴ります。

販売店で設定可能 **10秒/5秒/オフ**

2-3. 電池寿命お知らせ機能

電池残量が少なくなると、電子音（ポポポポーン）が15分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、補聴器を充電してください。充電器を常に携帯することをおすすめします。

販売店で設定可能 **オン/オフ**

■ **ワイヤレスアクセサリ（オプション）使用時**


ワイヤレスアクセサリ使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリが使えなくなります。充電すると、ワイヤレスアクセサリは再び使用できます。

電池残量	お知らせ音	補聴器	シンプルリモコン、リモコンユナイトII	TVユナイトII、携帯ユナイトII、マルチマイク、マイクロマイク、スマートフォンなど
(多)	—	○	○	○
(少)		○	○	×
(極少)		×	×	×

2-4. 音量調節

■ **音量調節**

本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。

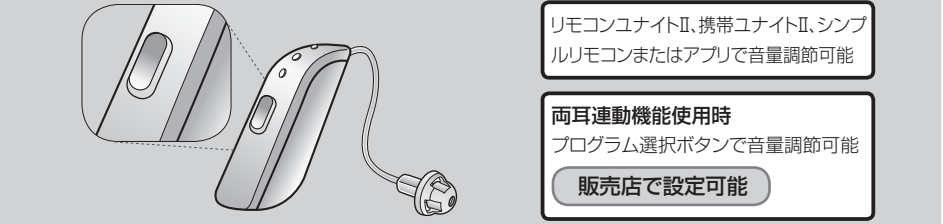

※ 電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。
※ 初期設定を変更した場合の詳細は、お買い求めの販売店にご相談ください。

■ **両耳連動機能使用時** **販売店で設定可能** **オン/オフ**
片耳の補聴器の音量を変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更します。

2-5. プログラム変更

お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。また、ワイヤレスプログラムも最大で3つ設定することができます。下記の操作をするたびに通常プログラム、またはワイヤレスプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。

販売店で設定可能

プログラムの切り替え方法	ワイヤレスプログラムの切り替え方法	
プログラム選択ボタンを押す	プログラム選択ボタンを1秒間長押しする	
プログラム	お知らせ音	内容・使用環境
プログラム1	ポーン	
プログラム2	ポーン、ポーン	
プログラム3	ポーン、ポーン、ポーン	
プログラム4	ポーン、ポーン、ポーン、ポーン	

■ **電源投入時の設定** **販売店で設定可能** **オン/オフ**
●「プログラム1」
■ **両耳連動機能使用時** **販売店で設定可能** **オン/オフ**
片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。

■ **フライトモード（ワイヤレス機能使用時）**

搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。（初期設定：オフ）

販売店で設定可能 **オン/オフ**

■ **フライトモードの設定方法**

- ① プログラム選択ボタンを5秒間長押し、電源をオフにしてください。
- ② プログラム選択ボタンを9秒間長押ししてください。
- ③ 「ポポーン、ポポーン、ポポーン、ポポーン…」というお知らせ音が鳴ると設定完了です。

■ **フライトモードの解除方法**

- ① プログラム選択ボタンを5秒間長押し、電源をオフにしてください。
- ② 電源がオフになったことを確認し、再度プログラム選択ボタンを5秒間長押し、電源をオンにしてください。


■ **お知らせライト**

LEDライトと音でプログラム変更と電源の入り切をお知らせします。

動作	お知らせライト
電源を入れる(5秒間長押しする)	点灯
電源を切る(5秒間長押しする)	3回点滅
フライトモードの設定	4回、2重点滅

2-6. 電話での使用

本補聴器は、装着したままでも電話を使用することができます。

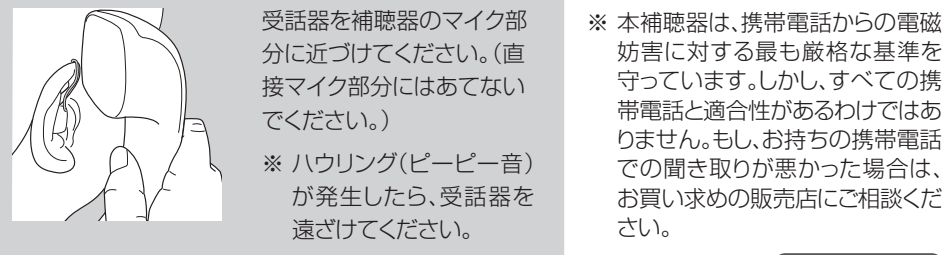

※ 本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

▶ 裏面へつづく

