



ReSound GN

# 取扱説明書

シンプルリモコン

GN Making Life Sound Better

# 目次

---

はじめに .....	3
安全上のご注意（必ずお守りください） .....	4
シンプルリモコンの使い方 .....	6
電池交換の仕方.....	12
日ごろのお手入れ.....	19
故障かな？と思ったら .....	21
警告 .....	22
アフターサービス.....	25

# はじめに

この度はリサウンド製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書ではシンプルリモコンの操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示内容を良く理解してから本文をお読みください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。

 <b>禁止</b>	この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
---	-------------------------

**重 傷：** 失明・ケガ・火傷・骨折・中毒など、後遺症が残ったり治療のための入院や長期の通院を必要とするものを示します。

**軽 傷：** 重傷に該当しないケガ・火傷などを示します。


**物的損傷：** 家屋・家財ならびに人身以外の家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

**使用 者：** 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族・友人など第三者・購入者から製品を譲渡された者などを含みます。

## シンプルリモコンの構造


表面：

1. お知らせライト
2. 音量調節ボタン (+)
3. 音量調節ボタン (-)
4. プログラム選択ボタン

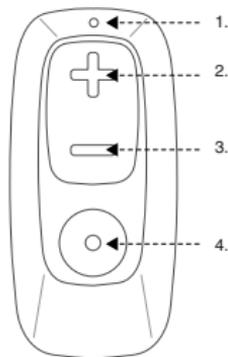

裏面：

5. 電池ケース
6. ペアリングボタン
7. ストラップホール

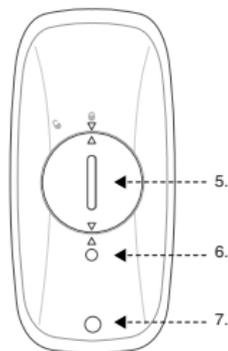

メモ：小さな矢印のマークを参考にして、電池ケースのカバーが確実に閉まっていることを確認してください。



メモ：シンプルリモコンにはリモコン機能を ON/OFF するスイッチはありません。


# シンプルリモコンの使い方

## ペアリング（補聴器とシンプルリモコンの接続）

シンプルリモコンをご使用いただく前に、お使いの補聴器とシンプルリモコンをペアリングする必要があります。以下の手順でペアリングしてください。

**i** メモ：シンプルリモコンのペアリングは、お買い求めの販売店で完了していることがあります。

1. 補聴器の電源はオフにしておきます。先の細いペンかそれに類するもので、シンプルリモコンの裏面にあるペアリングボタンを押します。ペアリングボタンを押すと、シンプルリモコンが20秒間ペアリングモードになります。

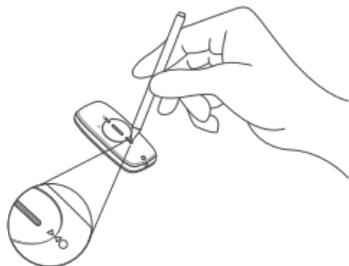

2. 補聴器の電源をオンにして、シンプルリモコンのそばに置きます。

3. ペアリングが完了すると、補聴器側でお知らせ音が鳴ります。
4. これでシンプルリモコンをご使用いただけます。



**警告：**シンプルリモコンのご使用中に、皮膚に刺激を感じられた場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



**メモ：**ご使用する補聴器以外にはシンプルリモコンを接続しないでください。

## お知らせライトについて

音量調節ボタンまたはプログラム選択ボタンを押すと、シンプルリモコンのお知らせライトが毎回点灯します。

シンプルリモコンがペアリングモードのときは、お知らせライトが2秒おきに点滅します。

## 補聴器の音量調節

お使いの補聴器は適切な音量に調整されていますが、お好みに合わせて手動で調節することもできます。次のように音量を調節してください。

1. 音量調節ボタンの上側（+）を押すと、音量が上がります。



2. 音量調節ボタンの下側（-）を押すと、音量が下がります。



メモ：補聴器の電源をオフにしてもう一度電源をオンにしたときは、補聴器の音量が初期設定に戻りません。

- i** メモ：音量調節ボタン（-）を1秒以上押し続けると、補聴器を消音状態にできます。いずれかのボタンを押せば、消音状態は解除されます。

## 補聴器のプログラム変更

1. プログラムを変更するには、プログラム選択ボタンを押します。



- i** メモ：補聴器の電源をオフにしてからもう一度電源を入れると、補聴器のプログラムは初期設定に戻ります。

## TV ユナイトⅡ / マルチマイク / マイクロマイク（オプション）を使用する場合

お買い求めの販売店によってワイヤレスプログラムが利用可能な状態に設定されている場合、お使いの補聴器にTV ユナイトⅡ / マルチマイク / マイクロマイク（別売オプション）からの音声を入れることができます。次の手順に従ってワイヤレスプログラムを起動してください。

## ワイヤレス音声受信モードの開始

1. プログラム選択ボタンを1秒以上、またはお知らせ音が鳴るまで押し続けます。これでお使いの補聴器が、ワイヤレスプログラムに切り換ります。



- i** メモ：お使いの補聴器でワイヤレスプログラムが複数設定されている場合は、再度1秒以上プログラム選択ボタンを押すと、次のワイヤレスプログラムに切り換ります。

2. プログラム選択ボタンを軽く押すと、以前に使用していたプログラムに戻ります。



## シンプルリモコンのロック

シンプルリモコンをロックしておくことで、ポケットに入れて持ち運ぶときなどの不要な動作を防止できます。

1. プログラム選択ボタンと音量調節ボタン（-）を同時に**5 秒間**押し続けます。シンプルリモコンの上部にあるお知らせライトが3回点滅します。
2. シンプルリモコンのロックを解除するには、1の手順を繰り返します。ロックが解除されると、お知らせライトが1回だけ点滅します。



- i** **メモ：**ロックされている状態でシンプルリモコンのボタンを押すと、そのたびにお知らせライトが3回点滅しますが、それによって音量や選択されているプログラムが変わることはありません。

# 電池交換の仕方

## 電池


シンプルリモコンには CR2032 コイン型リチウム電池をご使用ください。

## 電池交換




メモ：必ずお買い求めの販売店がお勧めする新品の電池をご使用ください。


1. コインを使って電池ケースを反時計回りに回して開きます。

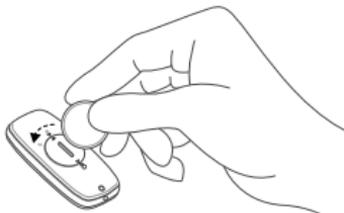

2. 図に示すように電池を置きます。必ず+のマークを上に向けてください。

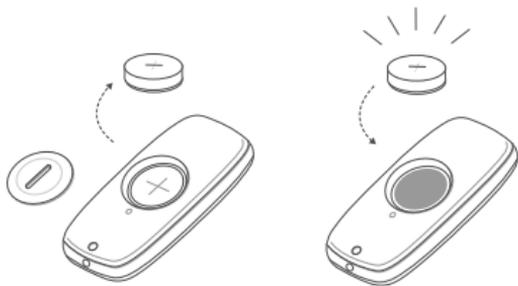


3. 電池ケースのカバーを元に戻し、コインを使って時計回りに回して閉めます。電池ケースのカバーに浮きなどが無いか、また矢印のマークが合っていることを確認してください。これでシンプルリモコンをご使用いただけます。

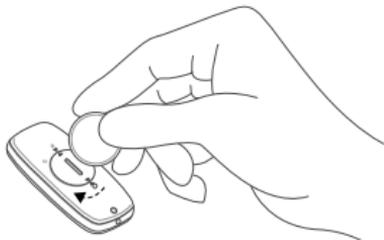


- i** メモ：電池ケースのカバーを閉じたときに、電池ケースのカバーの矢印マークと本体側の矢印マークが一致しているか確認してください。この位置になっていない場合、カバーは完全に閉じていません。
- i** メモ：もし電池ケースのカバーの取り付けが正しくないと考えられる場合、お買い求めの販売店へご相談ください。

## 電池ケースが確実に閉まっていることを確認する方法

電池ケースが確実に閉まっているか確認するには、矢印マークを確認します。以下の図に示すように矢印マークが一致しているか確認します。

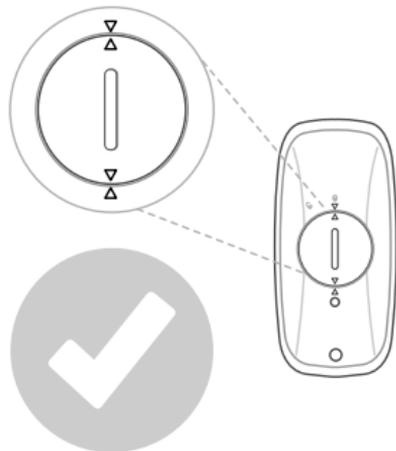

矢印マークが一致していない場合、電池ケースは確実に閉まっています。

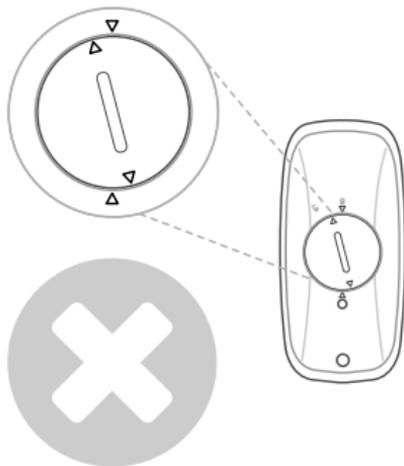

シンプルリモコンを水平に持ち、カバーが本体から浮いていないことを確認します。



電池ケースのカバーが浮いている場合、カバーは確実に閉まっていません。



## 電池に関する警告

お使いのシンプルリモコンはコイン型電池で動作します。シンプルリモコンをご使用いただく前に、次の安全情報をよくお読みください。

1. 電池を誤って飲み込むと、健康を脅かす恐れがあります。
  - コイン型リチウム電池は化学火傷を引き起こす恐れがあります。絶対に口に入れないでください。
  - 使用済みおよび新品の電池はお子様、知的障害のある方、およびペットから離れた場所に保管してください。
2. 電池を飲み込んだことが疑われる場合は、すみやかに医師または病院にご相談ください。この種類の電池を飲み込んでしまった場合、早ければ2時間以内に重度の体内火傷が発生し、致命傷になる恐れがあります。
3. シンプルリモコンを数日間ご使用にならない場合は、必ず電池を取り外してください。液漏れが発生する恐れがあります。

4. 電池は環境に有害です。絶対に電池を燃やさないください。使用済みの電池はお住まいの市町村の指示に従って処理してください。
5. 電池ケースのカバーはお子様、知的障害のある方、およびペットから離れた場所に保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。
6. 電池ケースが安全かつ確実に閉まらない場合は、シンプルリモコンの使用を中止し、お子様、知的障害のある方、およびペットから離れた場所に保管してください。
7. 絶対にコイン型リチウム電池を充電しないでください。液漏れや爆発が起きる恐れがあります。
8. 電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。
9. ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しないでください。
10. 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

# 日ごろのお手入れ

## シンプルリモコンの清掃の仕方

1. シンプルリモコンの清掃には、乾いた布をご使用ください。機器の清掃に家庭用洗剤（粉末洗剤、石けんなど）やアルコールは絶対に使用しないでください。
2. シンプルリモコンを清掃するときや電池を交換するときには、必ず柔らかい面にシンプルリモコンを置いてください。このようにすることで、床への落下を防止できます。
3. シンプルリモコンを過度の湿気や熱にさらさないでください（入浴中や水泳中に使用したり、ラジエーターや車のダッシュボードに放置したりしないでください）。
4. シンプルリモコンに過度な衝撃や振動を加えないでください。



注意：シンプルリモコンの清掃には、絶対に水などの液体を使用しないでください。シンプルリモコンが故障する恐れがあります。



メモ：シンプルリモコンの廃棄方法についてご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

# 故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対策
ボタンを押してもライトが点灯しない。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 電池が消耗しています。</li><li>2. 電池の向きが間違っています。</li><li>3. シンプルリモコンが補聴器と通信中です。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 電池を交換してください。</li><li>2. 電池を正しい向きに置いてください。</li><li>3. 数秒間待ってからもう一度ボタンを押してください。</li></ol>
ボタンを押すとお知らせライトが点灯するが、音量またはプログラムが変わらない。	シンプルリモコンが動作範囲から外れています（ポケットの中など）。	シンプルリモコンをご自身に近づけて、数秒間待ってからもう一度ボタンを押してください。

# 警告

## 一般的な警告事項

1. シンプルリモコンを高温や高湿度には絶対にさらさないでください。
2. 運転中はシンプルリモコンを使用しないでください。
3. 爆発の危険がある場所や、可燃性ガスが発火する危険のある場所では使用しないでください。
4. X線放射（CT スキャン）や MRI スキャンなどは本機器の正常動作に悪影響を及ぼすことがあります。X線治療等を受ける前に治療室の外に保管しておくことをお勧めします。
5. 3歳未満のお子様の手の届く場所にシンプルリモコンを置かないでください。
6. シンプルリモコンは作動中の機械から離れた場所に保管してください。
7. 本製品が過熱した場合、本製品を落下または損傷させてしまった場合、または本製品を水没させてしまった場合は使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

8. 本製品を雨や湿気、その他の液体にさらさないでください。本製品が損傷したり、お客様が負傷したりする恐れがあります。
9. シンプルリモコンはデジタル符号化された微弱電波を使って他のワイヤレス機器と通信します。それにより、近くにある電子機器が影響を受けることがあります。そのような場合は、影響を受けている電子機器からシンプルリモコンを離してください。
10. シンプルリモコンは他の装置による干渉を受けることがあります。シンプルリモコンの使用中に電磁干渉を受けるときは、電磁波源から離れてください。



## 一般的な注意事項

1. 飛行機に乗るときや無線通信機器の使用が禁止されている区域に入るときは、シンプルリモコンは使用しないでください。フライトモードにすることによって補聴器の無線送信が無効になります。ご使用の補聴器をフライトモードに設定する方法については補聴器の取扱説明書でご確認ください。

2. 周囲にある機器と干渉して補聴器が応答しない場合、その場所を離れてください。
3. 電子機器の使用が禁止されている場所では本機器を使用しないでください。
4. ご使用の補聴器と本機器をペアリングすると、固有の識別コードが付与されます。これによって本機器は、他の人が装着している補聴器に影響を及ぼしません。
5. 高出力の電子機器や大型の電子装置、金属構造物の影響によって通信距離が著しく縮小することがあります。
6. シンプルリモコンを分解または改造すると、シンプルリモコンが損傷する恐れがあります。本取扱説明書の「故障かな？と思ったら」に記載されている対処法に従っても解決できない問題が発生した場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
7. シンプルリモコンの修理は認定サービスセンターでのみ対応しています。

# アフターサービス

## 保証書（別添付）

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめになり、大切に保管してください。保証適用時には、保証書が必要となります。

## 修理について

- 保証期間中  
保証書を添えてお買い求めの販売店へお持ちください。保証書の規定に従って、修理いたします。保証期間終了後及び保証書の提示がない場合は有料となります。
- 保証期間後  
お買い求めの販売店にご相談ください。修理により使用可能な場合は、ご要望により有料で修理いたします。

## 仕様について

改良のため仕様は予告なく変更される場合があります。

この機器の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. ワイヤレスアクセサリを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用場所を変えるか、または使用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社のカスタマーサービス（0120-921-310）までお問い合わせください。



この機器は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

## 主な仕様

外形寸法：	73 × 35 × 14mm
質量：	22.5g
電源：	CR2032 コイン型リチウム電池
通信距離：	最大 3 メートル
使用周波数帯域：	2.4GHz 帯
使用可能温度：	0 ~ 55℃
保管温度：	-20℃ ~ 60℃
公称 RF 送信出力レベル：	4dBm

© 2019 GN Hearing A/S. All rights reserved. ReSound is a trademark of GN Hearing A/S.

製造販売元

## GN ヒアリングジャパン株式会社

一般のお客様電話番号  0120-921-102販売店様専用電話番号  0120-921-310FAX 番号  0120-636-392受付：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 30 分  
(土日祝日、年末年始は休み)

〒 220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-3 MM パークビル 8F