



ポケット型補聴器

取扱説明書

☐ CC-V

☐ CC-PV

この度は、弊社補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は耳に装用し音を大きくすることで、難聴により聞き取りづらい音を増幅し聞くことを可能とすることを目的とした医療機器です。

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みいただき、安全に関する注意事項を必ず守って正しくご使用ください。

取扱説明書は、必要な時にお読みいただけますよう大切に保管してください。

目次

注意事項	3
本製品について	18
本製品の目的	18
本製品の動作	18
同梱品の一覧	19
各部名称	21
交換可能な部品・付属品 .	23
使用する電池	24
補聴器の機能	25
画面表示	28
本製品の使用方法	30
使用前の準備	30
使用中の操作	37
使用後の取り扱い	39
お手入れと保管	40
お手入れの方法	40
保管方法	40
電池交換	41

故障かなと思ったら	43
その他の情報	45
処理の方法	45
製品仕様	46
その他ご不明な点	46

注意事項

補聴器を使用する上で必ずお守りください。

人体への被害や財産への損害、補聴器の故障を未然に防ぐために、よくお読みになってからご使用ください。

記号の意味

	してはいけないことを表します。
	必ず行っていただくことを表します。
	分解してはいけないことを表します。
	お風呂やシャワーなどで使用してはいけないことを表します。

安全上の注意



MRI 検査時は補聴器を使用しないでください。

発熱による火傷や、過大な音が発生して聴力が低下するおそれがあります。

MRI 検査のときには補聴器を必ずはずしてください。



植込み型医療機器に近付けないで下さい。

心臓ペースメーカー等植込み型医療機器が誤作動し、心肺停止などにつながるおそれがあります。

併用される際は、必ず 15 cm 以上離してご使用ください。

安全上の注意



イヤホンコード
やストラップが
巻き込まれない
ようにしてくだ
さい。

首が締めり、窒息するお
それがあります。

扉にはさまれたり、引っ
かかったりしないよう十分
ご注意ください。



幼児の手の届か
ないところに保
管してください。

誤って電池を飲み込んで
のどを詰まらせたり火傷を
負ったりするおそれがあり
ます。

必ず幼児の手の届かない
ところに保管してくださ
い。

安全上の注意



高電圧や強い磁場が発生する場所で使用しないでください。

誤動作して過大な音が発生し、聴力がより低下するおそれがあります。

高電圧や強磁場が発生しない場所でご使用ください。



他の人に使用しないでください。

過大な音により聴力が低下するおそれがあります。

他の人に補聴器を貸したり与えたりしないでください。

安全上の注意



耳に異常が発生したら医師に相談してください。

体質によっては、補聴器を付けたときに耳垢の増加や耳の中のかゆみなどの異常が発生する可能性があります。

何らかの異常が起きたら、医師の診察を受けてください。



耳の中に部品が残ったら医師に相談してください。

部品が外れて怪我をするおそれがあります。

万が一、外れて耳の中に残ってしまったら医師の診断を受けてください。

安全上の注意



耳の奥へ入れすぎないでください。

耳の怪我や聴力低下のおそれがあります。

装着するときは奥に入れ過ぎないように注意してください。



引火のおそれのある環境で使用しないでください。

引火して火傷を負うおそれがあります。

可燃性麻酔剤や高酸素濃度の環境などの引火のおそれのある環境で使用しないでください。

安全上の注意



電池から漏れた液に触れないでください。

電池から漏れた液に直接触れると皮膚を腐食するおそれがあります。触れた際には、水で手を良く洗ってください。万が一目に入ったら、直ちに医師の診断を受けてください。



電池を火へ投入や加熱をしないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。

電池を火の中に入れたり加熱される環境で保管したりしないでください。

安全上の注意



電池は他の金属と接触させずに保管してください。

ショートによる発熱で火傷や火災につながるおそれがあります。

ネックレスなどの金属や他の電池と一緒に保管しないでください。保管の際は、電気を通さないテープなどで電池を覆ってください。



電池を逆向きに挿入しないでください。

補聴器が異常動作して発熱し火傷を負うおそれがあります。

向きを確認して正しく電池を入れてください。

安全上の注意



指定された機器
とのみ接続して
ください。

弊社指定外のイヤホンと
接続した場合、補聴器が異
常動作するおそれがありま
す。

イヤホンを使用する場合
は、弊社指定の機器をご使
用ください。指定機器につ
きましては販売員にお問い
合わせください。

安全上の注意



故障した状態で
使用しないでく
ださい。

過大な音の発生による
聴力低下や、耳の怪我など
につながるおそれがあり
ます。

補聴器が故障したときは
使用を中止し、販売員にご
相談ください。

取り扱い上の注意



風呂やシャワー
で使わないで
ください。

ショートして故障するお
それがあります。

水のかからない場所でご
使用ください。



補聴器を水に落
としたら電池を
はずしてくださ
い。

補聴器を水に落とした後
そのまま使用するとショ
ートして故障するおそれ
があります。

水に落としたらすぐに電
池をはずしてください。そ
の後の使用は控え販売店
にご相談ください。

取り扱い上の注意



電池は補聴器から取り出して保管してください。

電池を入れたまま長期間放置すると、液漏れや膨張により故障するおそれがあります。

電池は補聴器から取り出して保管してください。



強い衝撃を与えないでください。

衝撃で故障するおそれがあります。

固い床の上など、落とすと壊れやすい場所で補聴器を付けたり外したりしないでください。

持ち運ぶ際には、付属のハードケースもしくは補聴器に衝撃を与えないような容器に入れてください。

取り扱い上の注意



CT 検査やレントゲン検査時は補聴器を使用しないでください。

× 線により補聴器が故障するおそれがあります。
検査のときは補聴器を必ずはずしてください。



分解や改造をしないでください。

部品が破損して故障するおそれがあります。
分解や改造はしないでください。修理の際は販売員にご相談ください。

取り扱い上の注意



お手入れ時に薬品を使用しないでください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品をお手入れに使用すると、故障するおそれがあります。

お手入れには乾いた布と付属のブラシをご使用ください。



高温・多湿下では保管や長時間使用しないでください。

補聴器内部に湿気が浸入し故障するおそれがあります。

高温・多湿下で長時間使用せず、使用後はそのような場所は避けて室温で保管してください。

取り扱い上の注意



先の細いものを
挿入しないでく
ださい。

内部部品が破損し故障す
るおそれがあります。

細いワイヤーなどを入れ
ることはお控えください。



ペットのいたず
らに注意してく
ださい。

補聴器が故障したり、ペ
ットが怪我をしたりするお
それがあります。

ペットにいたずらされな
い場所で補聴器を使用・保
管してください。

本製品について

本製品の目的

難聴を補うために音を増幅します。本製品は調整によって適切な効果を発揮します。

本製品について

本製品の動作

補聴器は以下のように動作します。

1. マイクまたはテレコイルが音を取得します。
2. 増幅器が使用者に合った大きさに音を増幅します。
3. その音が耳に伝わることで聴力を補います。

同梱品の一覧

本製品につ
いて



補聴器本体



イヤホン
型式 ME101



イヤホン
コード



ジョイント



カラーバンド

耳栓

取扱説明書

アルカリ乾電池
単4形


保証書


添付文書

ストラップ

各部名称

本製品について

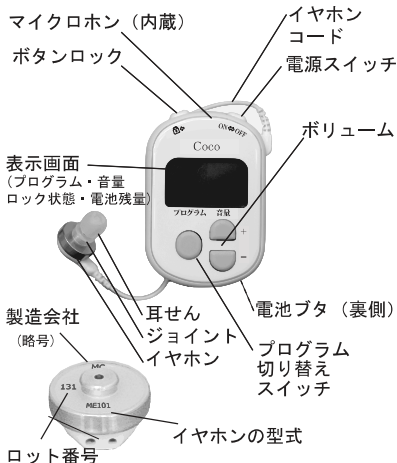

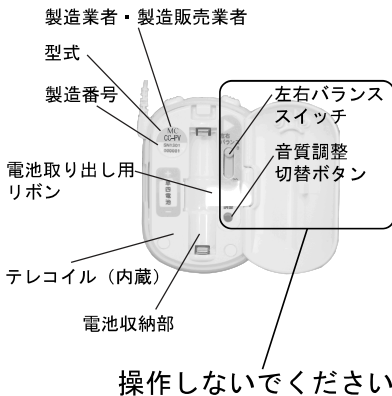

調整が変わり耳に合わない
音になると危険です。

交換可能な部品・付属品

以下の部品または付属品は交換が可能です。故障などで交換をご希望の際には販売員にご相談ください。

- イヤホン
- イヤホンコード
- ジョイント
- 耳栓
- ストラップ
- カラーバンド

使用する電池

種類：アルカリ乾電池
単 4 形 (LR03)

電圧：1.5 V

本製品につ
いて

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。そのほかの電池をご使用されると動作が不安定になる、使用時間が短くなるなどのおそれがあります。

補聴器の機能

本製品で利用できる機能を説明します。設定によっては機能の詳細が異なります。設定につきましては販売員にお問い合わせください。

ボタンのロック

意図しない誤作動を防ぐ機能です。ロック中はボタン操作が無効となります。ロックの方法は 37 ページを参照してください。

音量調節

補聴器が出力する音量を調節する機能です。音量調節の方法については、38 ページを参照してください。

プログラム切替

環境や用途に合わせて最大4つのプログラムへ切り替えられます。プログラムの切り替え方法は 38 ページを参照してください。


- 通常
会話の聞き取りを重視したプログラムです。
- 音楽
音楽鑑賞に適したプログラムです。
- テレコイル
電話や磁気ループなどの磁気を利用した音声を聞くための機能です。
- 通常/テレコイル
上記の通常とテレコイル両方の音声が聞けます。

電池残量お知らせ

ご使用の電池の残量が画面に表示されます。また電池の残量が少なくなると音でお知らせします。表示の目盛が減る、又は「ププ♪」と3回お知らせ音が鳴りましたら電池を交換してください。

画面表示

本製品について

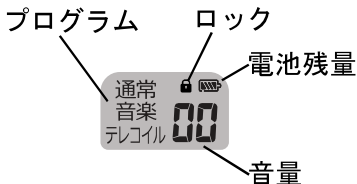

- プログラム
現在のプログラムが表示されます。
- ロック
ボタンのロックの状態が表示されます。ロック中はカギのマークが表示されます。操作方法は38ページを参照してください。

- 電池残量
現在の電池残量が5段階で表示されます。



- 音量
現在の音量が表示されます。

本製品の使用法

使用前の準備

左右の確認

補聴器を使用する前に、右耳用と左耳用を確認してお使いください。CC-PV で左右バランス機能を使用していて左右の音量が異なる場合には、イヤホンに貼られているシールの色を確認して、正しい側の耳にイヤホンを装着してください。

青 : 左耳用
赤 : 右耳用

本製品の
使用法

ストラップの取り付け

補聴器を首から下げる場合、付属のストラップをご使用ください。

1. 電池ボタンを開けてください。
2. 上部カラーバンドの穴にストラップを通してください。
3. 内部のフックに引っかけてください。
4. 電池ボタンを閉じてからご使用ください。




本製品の使
用方法

電源オン

以下の手順で電源を入れます。

本製品の
使用方法

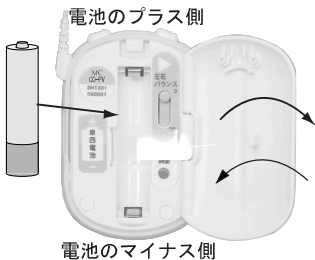

1. プラスの向きに注意して電池を電池収納部へ入れます




2. 電源スイッチを ON の位置
にすると電源が入ります

補聴器の装着

以下の手順で補聴器を装着します。

本製品の
使用方法

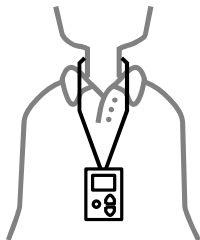

1. 胸の前に本体が来るように、本体のネックストラップを首からかけてください。



2. 販売時に音質・音量調整した側の耳にイヤホンを着用してください。


使用中の操作

代表的な操作方法を説明します。
設定によって操作方法が異なる場合があります。設定の詳細は販売員にお問い合わせください。

本製品の
使用方法

ロック操作

本体上部のスイッチを鍵マークの位置にスライドするとロックします。元の位置に戻すとロックが解除されます。

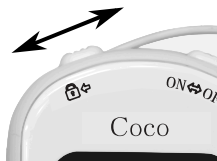

音量調節

ボリュームで 0～25 の間で音量を調節します。上側ボタンを押すと音量が大きくなります。下側ボタンを押すと音量が小さくなります。音量の数値が画面に表示されます。

プログラム切替

プログラムの切り替えは、プログラムボタンを押すことでできます。「ププ♪」という音が鳴り、どのプログラムに切り替わったかを画面上に表示します。

使用後の取り扱い

補聴器の取り外し

以下の手順で補聴器を外します。

1. 耳栓を耳の穴から取り出します。
2. ネックストラップを外します。

電源オフ

以下の手順で電源を切ります。

1. 補聴器を外します。
2. 補聴器の電源スイッチを「OFF」の位置にすると電源が切れます。

お手入れと保管

お手入れの方法

補聴器のお手入れには、乾いた柔らかい布を使用します。補聴器使用後は、乾いた柔らかい布などで汚れや汗をふき取ってください。

保管方法

補聴器はいつも清潔な状態にしておき、常温で保管してください。


お手入れと
保管

電池交換

電池がなくなったら以下の手順で交換します。

必ず電池のプラス・マイナスを確認し正しく入れてください。正常に動作しません。

1. 電池ブタを開いてください。
2. 取り外し用リボンを引っ張り、電池を外してください。
3. 電池収納部に電池を入れてください。電池収納部の横の図を参考に上下を合わせて入れてください。
4. 電池ブタを閉めてください。

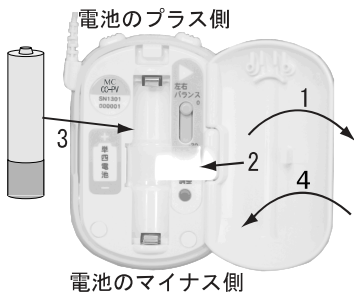

お手入れと
保管

故障かなと思ったら

症状	原因	対処
音が出ない。	電池が切れている。	電池を交換してください。
	マイクや耳栓にゴミなどが詰まっている。	ゴミを取り除いてください。
	音の出入り口が水や湿気で詰まっている。	乾燥させてください。
	電池のプラス・マイナスが逆向きになっている。	電池の入れ方を確認してください。
ピーピー音がする。	耳栓が耳にきちんと入っていない。	耳に正しく入れなおしてください。
異音がする。	強い電磁波を発生する機器※がある。	機器から離れてください。

故障かな
と思ったら

症状	原因	対処
操作が反映されない。	ボタンがロックされている	ロックを解除してください

※ IH クッキングヒーター、磁気まくら、金属探知システム、電気毛布、盗難防止システム（EAS）、電気カーペット、蛍光灯、各種溶接機器、誘導型溶解炉、高周波治療器、神経電気刺激治療器、磁気温熱治療器、小型無線機など

上記の方法を試しても直らない場合は、補聴器の故障が考えられます。販売員にご相談ください。

故障かな
と思ったら

その他の情報

処理の方法

電池の廃棄

使用済み電池の廃棄は、お住まいの市区町村の指示に従ってください。また、補聴器販売店でも回収を行っております。販売員までお申し付けください。

不要になった補聴器の処理

不要になった補聴器は、お住まいの市区町村の指示に従って処分してください。もしくは販売員にご相談ください。

製品仕様

補聴器の音響特性などの仕様は、
プロダクトインフォメーションに
記載されています。

その他ご不明な点

次のことがありましたら販売員
までお問い合わせください。

- 設定や機能でわからないことがあったとき
- 日常のお手入れでわからないことがあったとき
- 取扱説明書に載っていない動作をしたとき
- 修理を依頼したいとき

メモ

メモ

発売元・お問い合わせ先

GNヒアリングジャパン株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
MMパークビル8F

 0120-921-310 (TEL)
0120-636-392 (FAX)

製造販売元

マキチエ株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-2-4